



# Kit de PROTECCIÓN FACIAL

Máscara protectora

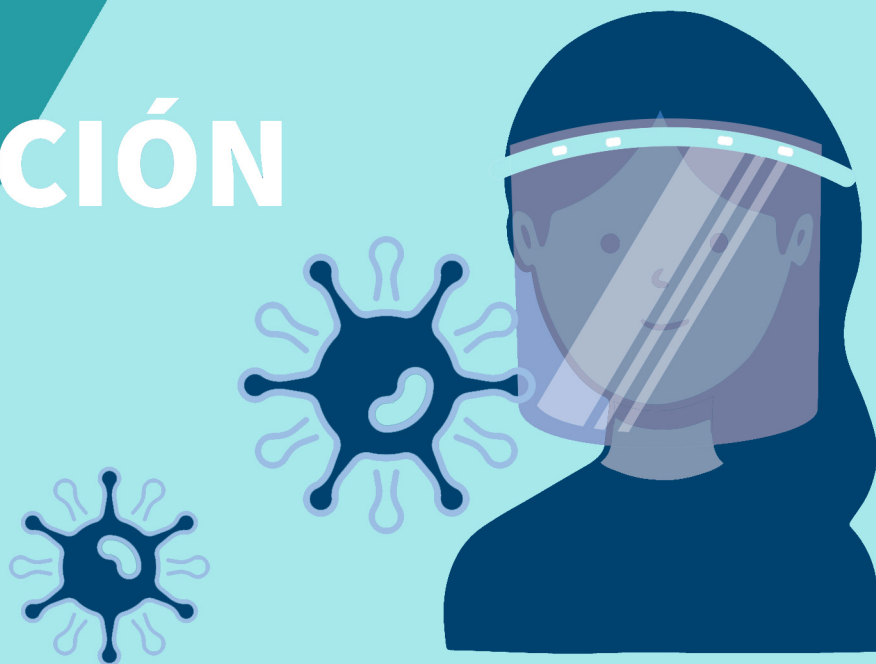

Con el **Kit de Protección Facial** protegerá su rostro de gotículas respiratorias que pueden ser infecciosas y del contacto inconsciente con sus propias manos.


1

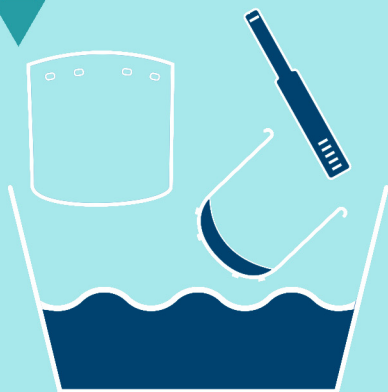

## 1) Desinfección


Inmersión en agua con lejía al 10% durante 10 minutos.

2

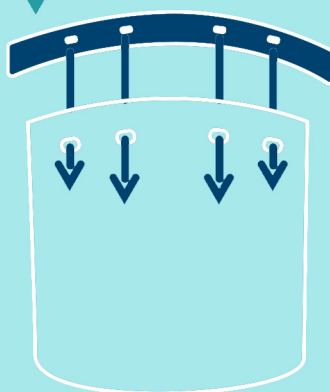

## 2) Montaje de Máscara

Acople una pantalla a la diadema mediante sus cuatro agujeros.

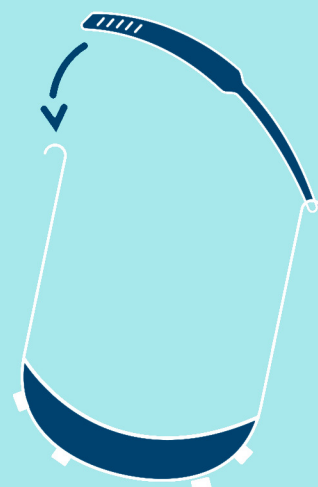


Coloque la banda de sujeción y ajuste al tamaño deseado.

Importante:  
Use guantes para el montaje



x1 Diadema de PP

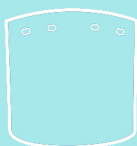

x1 Pantallas de PET



x1 Banda de sujeción

#TodoVaASalirBien

## PANTALLAS FACIALES DE PROTECCIÓN ANTISALPICADURAS

### Instrucciones de montaje




**Certificado de ensayo por AIMPLAS**  
UNE-EN 166 (abril 2002) para el campo  
de uso 3: "Gotas y salpicaduras de  
líquidos".

Incluye:

- Pantalla facial
- 23-25 cm cinta elástica de color\*
- 15 cm banda de foam adhesiva color\*


\*Los colores pueden variar

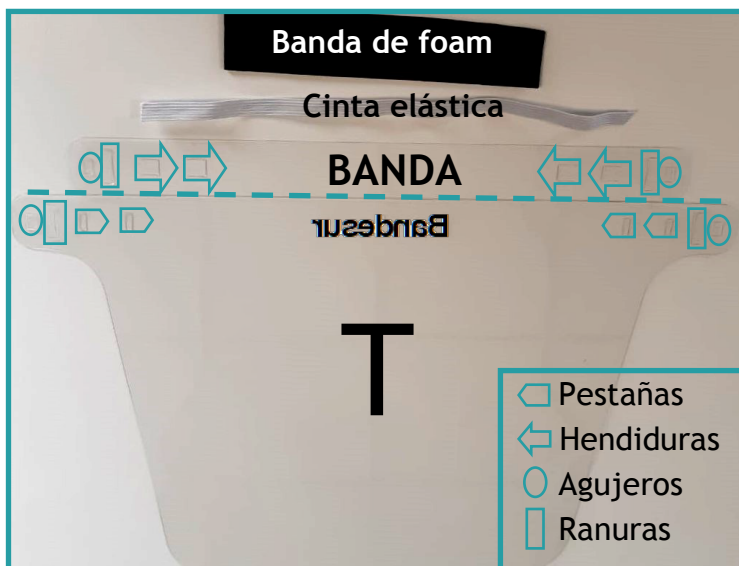


1. Separar (línea de rayas) la BANDA y la T (la palabra Bandesur debe quedar al revés) y extender sobre una superficie plana junto a la banda de foam (15 cm) y la cinta elástica (23-25 cm).



2. Despegar el adhesivo de la banda de foam y pegarlo en la BANDA (centrado).

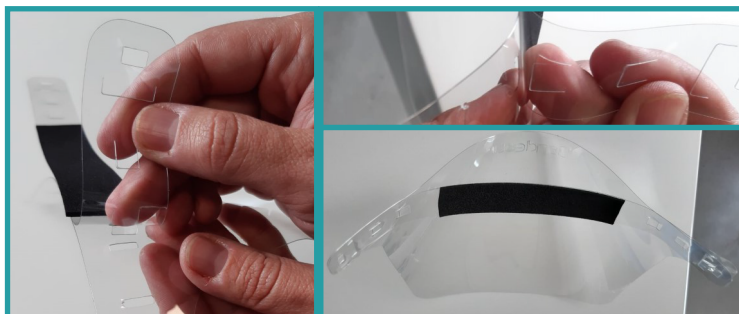

3. Enganchar las pestañas de la BANDA con las hendiduras superiores de la T.

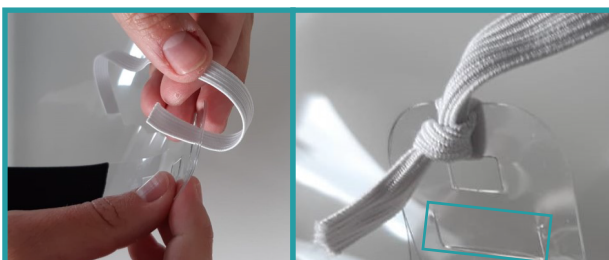

4. Introducir cada extremo de la cinta elástica por los agujeros externos de la T y la Banda, y hacer un nudo, si se quiere, también se puede pasar por la ranura de al lado.

### CARACTERÍSTICAS

**Barrera mecánica:** Antisalpicaduras

**Superficie:** 292x240 mm

**Material:** PET Alimentario

**Transparencia:** 4/5

**Desinfección:** Con alcohol pulverizado o con un paño húmedo con agua y lejía

**Desecho:** Contenedor amarillo, 100% reciclable

#TodoVaASalirBien

#EsteVirusLoParamosUnidos

# COVID-19

## Bandesur

ENVASES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

# Kit de PROTECCIÓN FACIAL



## Bandesur

ENVASES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

*#TodoVaASalirBien*

*#EsteVirusLoParamosUnidos*

Bandesur Alcalá, S.A. | Pol. Ind. El Chaparral, s/n | 23682 Alcalá la Real (Jaén)  
+34 953 59 73 02 | [info@bandesur.com](mailto:info@bandesur.com) | [www.bandesur.com](http://www.bandesur.com)



# COVID-19

## Bandesur

ENVASES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

## PANTALLA FACIAL DE PROTECCIÓN



### CARACTERÍSTICAS:

**Barrera mecánica:** anti-salpicaduras

**Dimensiones faciales:** 292x240mm

**Incluye:** Pantalla facial, banda de foam, cinta elástica e instrucciones de montaje

**Material:** PET 100% reciclable

**Transparencia:** 4/5

**Higienización para su reutilización:** paño suave con solución desinfectante

**Desecho:** contenedor amarillo

**Certificado de ensayo por AIMPLAS:**

UNE-EN 166 (abril 2002) para el campo de uso 3:

“Gotas y salpicaduras de líquidos”.

## Bandesur

ENVASES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

#TodoVaASalirBien

#EsteVirusLoParamosUnidos

Bandesur Alcalá, S.A. | Pol. Ind. El Chaparral, s/n | 23682 Alcalá la Real (Jaén)  
+34 953 59 73 02 | info@bandesur.com | www.bandesur.com



# COVID-19

## Bandesur

ENVASES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA



# BATAS Desechables

## Bandesur

ENVASES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

*#TodoVaASalirBien*

*#EsteVirusLoParamosUnidos*

Bandesur Alcalá, S.A. | Pol. Ind. El Chaparral, s/n | 23682 Alcalá la Real (Jaén)  
+34 953 59 73 02 | [info@bandesur.com](mailto:info@bandesur.com) | [www.bandesur.com](http://www.bandesur.com)